


Instrução de Montagem


Assento Sanitário Elevado Almofadado 7,5cm

- i** Observe que na embalagem, junto ao produto, há um kit de fixação composto de 02 parafusos, 02 porcas e 01 tubo espaçador. Esses itens serão empregados na fixação do assento à louça sanitária. Para tal fixação proceda conforme os seguintes passos:


- 1.** Desenrosque as porcas de fixação do aro almofadado, conforme indicado na figura ao lado.

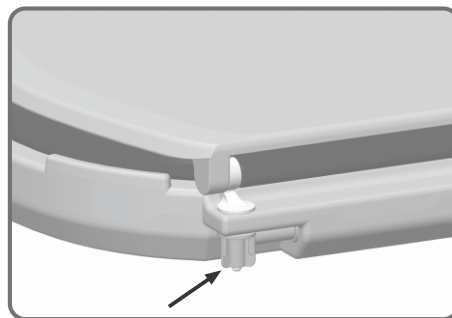

- 2.** Desencaixe o aro almofadado do aro PEAD, conforme mostrado na figura ao lado.

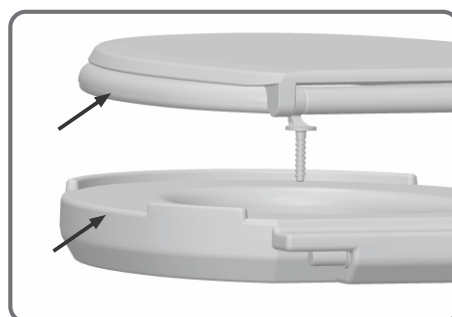

- 3.** Encaixe os parafusos nas extremidades do eixo do aro PEAD com o detalhe em forma de "V" (indicado pela seta) voltado para a parte de trás do vaso.

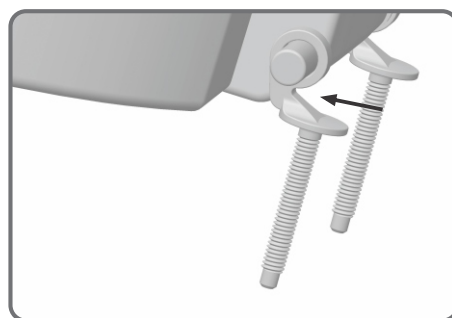


Instrução de Montagem

Assento Sanitário Elevado Almofadado 7,5cm

4. Em seguida monte o aro PEAD nos furos de fixação da louça sanitária, conforme mostrado na figura ao lado. Se necessário, ajuste a posição dos parafusos no eixo do assento.



5. Com uma régua ou qualquer outro meio de medição, meça a distância entre o parafuso e o flange da bucha, indicado pela seta na figura ao lado e corte o tubo espaçador em duas partes de acordo com as medidas encontradas. Para cortar o tubo espaçador, use uma serra manual.

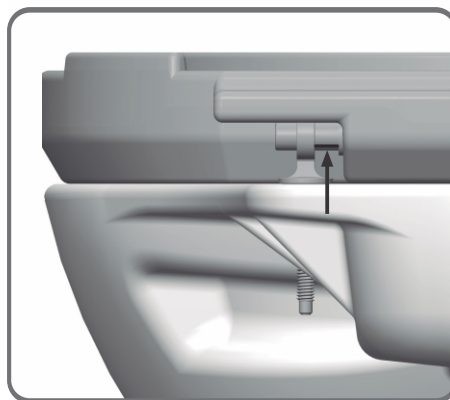

Atenção: Tenha cuidado ao cortar o tubo, evite acidentes.

6. Remova o assento da louça, desencaixe os parafusos do eixo, encaixe os dois espaçadores, encaixe novamente os parafusos.

Em seguida monte o assento na louça, conforme mostrado na figura ao lado.




Instrução de Montagem

Assento Sanitário Elevado Almofadado 7,5cm

7. Encaixe as porcas nos parafusos e aperte até que o assento fique bem fixado à louça.

Atenção: não utilize ferramentas para realizar o aperto das porcas.

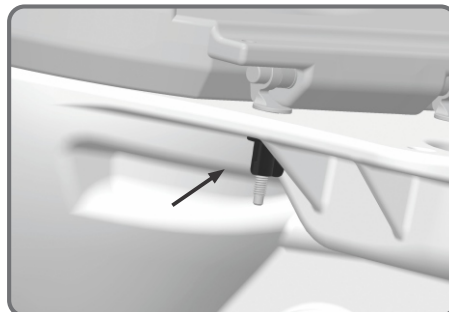

8. Encaixe o aro almofadado no aro PEAD, enrosque as porcas e aperte até que fique bem fixado.

Atenção: não utilize ferramentas para realizar o aperto das porcas.

