


Instrução de Montagem

Assento Sanitário Oval Aberto e Fechado para Cadeira de Banho

- i** Observe que na embalagem, junto ao produto, há um kit de fixação composto de 02 parafusos e 02 porcas. Esses itens serão empregados na fixação do assento à cadeira de banho.

- 1.** Encaixe os parafusos nas extremidades do eixo do aro PEAD com o detalhe em forma de "V" (indicado pela seta) voltado para trás.

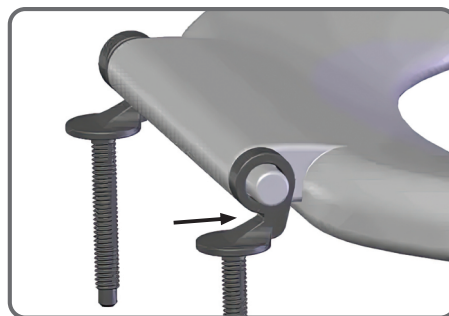

- 2.** Monte o assento na cadeira de banho. Encaixe as porcas nos parafusos e aperte até que o assento fique bem fixado.

Atenção: não utilize ferramentas para realizar o aperto das porcas.

