


Instrução de Montagem

Assento Sanitário Elevado

PEAD 7,5cm e PEAD 13,5cm

- i** Observe que na embalagem, junto ao produto, há um kit de fixação composto de 02 parafusos, 02 porcas e 01 tubo espaçador. Esses itens serão empregados na fixação do assento à louça sanitária. Para tal fixação proceda conforme os seguintes passos:


1. Encaixe os parafusos nas extremidades do eixo do assento com o detalhe em forma de "V" (indicado pela seta) voltado para a parte de trás do vaso.

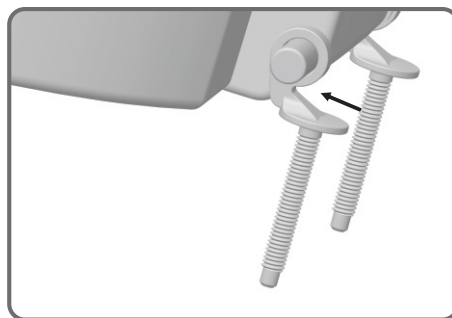

2. Em seguida monte o assento nos furos de fixação da louça sanitária, conforme mostrado na figura ao lado. Se necessário, ajuste a posição dos parafusos no eixo do assento.



3. Com uma régua ou qualquer outro meio de medição, meça a distância entre o parafuso e o flange da bucha, indicado pela seta na figura ao lado e corte o tubo espaçador em duas partes de acordo com as medidas encontradas. Para cortar o tubo espaçador, use uma serra manual.

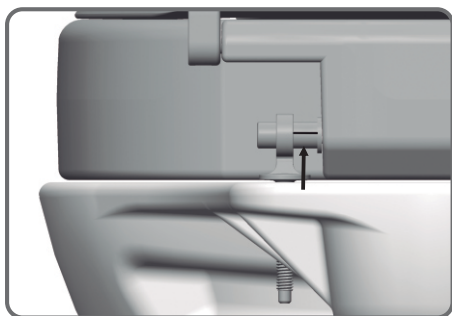


Atenção: Tenha cuidado ao cortar o tubo, evite acidentes.

Instrução de Montagem

Assento Sanitário Elevado

PEAD 7,5cm e PEAD 13,5cm

4. Remova o assento da louça, desencaixe os parafusos do eixo, encaixe os dois espaçadores, encaixe novamente os parafusos e em seguida monte o assento na louça, conforme mostrado na figura ao lado.

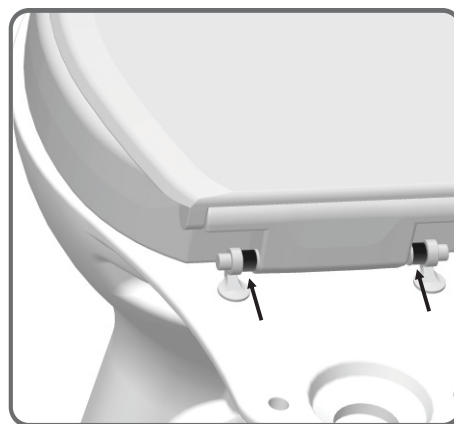

5. Encaixe as porcas nos parafusos e aperte até que o assento fique bem fixado à louça.

Atenção: não utilize ferramentas para realizar o aperto das porcas.

